


Manuel d'utilisation

DOPPLER FOETAL
CHAMADE

Dessin non contractuel

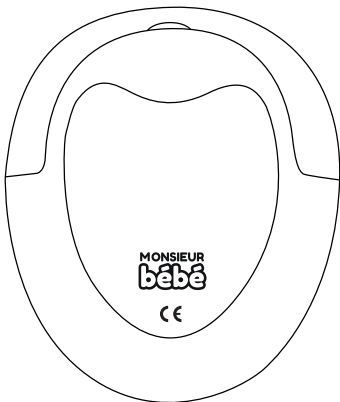

« Votre premier contact
sonore avec bébé » »

FR

**MONSIEUR
bébé**

www.monsieur-bébé.fr

Nous vous remercions d'avoir choisi le doppler foetal
Chamade de **MONSIEUR BÉBÉ**. Pour la sécurité de votre
enfant, veuillez lire attentivement la notice. Le doppler foetal
Chamade est conforme aux exigences de sécurité.

**IMPORTANT !
LIRE ET RESPECTER
SCRUPULEUSEMENT LES
INSTRUCTIONS CI-APRÈS ET
LES CONSERVER POUR UNE
CONSULTATION ULTÉRIEURE.**

CHAMADE

Doppler foetal

Toute future mère cherche à communiquer avec son enfant.

Le doppler foetal Chamade de Monsieur Bébé facilite cet échange. Il permet aux futures mères et même aux autres membres de la famille d'écouter battre le coeur de l'enfant, dès la 16ème semaine de grossesse.

Ecoutez ce petit coeur qui bat pour vous.

MONSIEUR
bé

€

1. AVERTISSEMENTS	P6
.....	
2. INFORMATIONS GÉNÉRALES ET CONSEILS	P7
.....	
3. INSTRUCTIONS D'UTILISATION	P8
.....	
4. ENREGISTREMENT DE L'AUDIO	P13
.....	
5. PANNES ET DIAGNOSTICS	P14
.....	




AVERTISSEMENTS :

L'appareil Chamade n'a aucun but de diagnostic et ne remplace en aucun cas le rôle d'un médecin. Pour toutes questions, consulter un médecin.

Informations générales et conseils :


- Le doppler Chamade capte les battements du coeur du bébé et les transforme en signal sonore.
- Le rythme cardiaque d'un fœtus est différent de celui d'un adulte. Le rythme cardiaque fœtal oscille entre 120 et 160 pulsations.
- Il est possible de détecter le rythme cardiaque fœtal avec un doppler à partir de 16 semaines de grossesse.
- La sonde est la protubérance plate sous le doppler. Elle doit être mise en contact avec la peau du ventre de la mère. Du gel de contact « ultrasonique » (le même que pour les échographies) doit être utilisé. À défaut de gel, de l'eau ou de l'huile alimentaire peuvent être utilisées.
- Lors de l'application et du déplacement de la sonde les écouteurs amplifient fortement les sons parasites naturels. Afin de protéger les oreilles de l'utilisateur de ces bruits désagréables, il est recommandé de baisser le volume au début de la manipulation et de l'augmenter ensuite.
- Les téléphones mobiles ou autres appareils émettant des ondes peuvent interférer. Il est donc conseillé de les tenir à l'écart.
- Il est déconseillé d'utiliser le doppler plus de 3 fois par jour et plus de 3 minutes consécutives à chaque fois.
- Le Chamade doit être nettoyé avec un chiffon humide ou une lingette désinfectante après chaque utilisation et rangé dans un endroit sec.

①

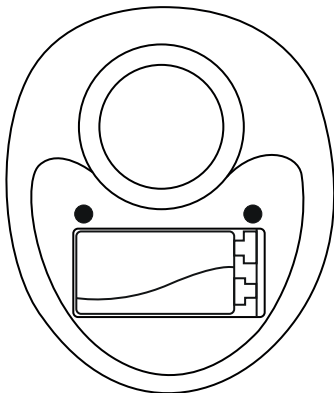


Brancher la pile et refermer le boîtier.

②

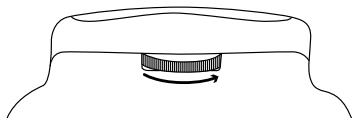


Tourner la molette au-dessus du doppler jusqu'à ce que le coeur s'illumine.

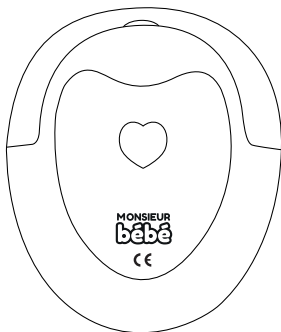


Cette molette sert aussi à l'ajustement du volume sonore. Positionner la molette à un niveau faible, c'est-à-dire proche de la position d'allumage.

③

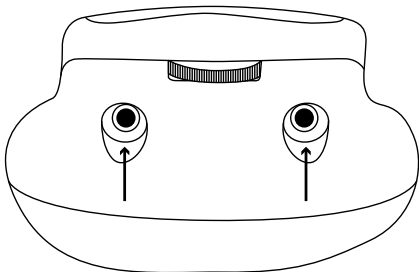


Brancher les écouteurs. La double sortie audio permet de brancher jusqu'à deux paires d'écouteurs.

④

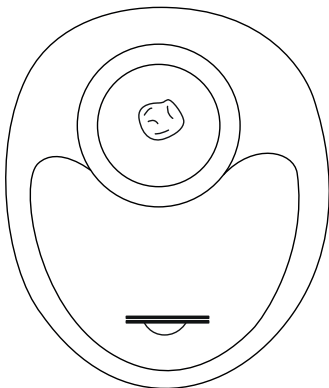

Appliquer une noix de gel sur la sonde. Mettre délicatement la sonde en contact avec le ventre de la mère.

5

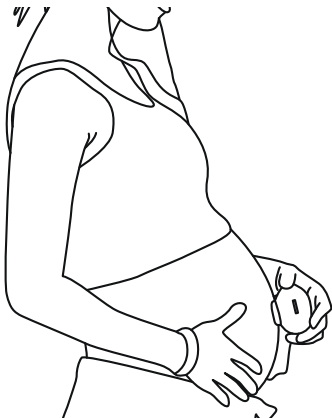

Déplacer lentement et incliner le Chamade sur le ventre jusqu'à entendre les battements de coeur. Les battements seront captés quand la sonde sera orientée en direction du coeur du bébé. Cela demande un peu de patience.

Ajuster le volume du son si nécessaire.

Le doppler Chamade peut être connecté à un ordinateur comme un micro pour enregistrer les battements du coeur de bébé.

Brancher le doppler Chamade à un ordinateur grâce au câble « micro ». Utiliser n'importe quel logiciel d'enregistrement de son.

Sous Windows, un enregistreur est intégré. Pour y accéder, sélectionner « Tous les programmes » > « Accessoires » > « Magnétophone ».

Note : Si vous ne percevez pas de battement même après avoir tenté diverses orientations du doppler, ne vous inquiétez pas. Les battements du coeur de l'enfant sont perceptibles à partir de la 16ème semaine de grossesse, au plus tôt. Certains enfants nécessiteront quelques semaines de plus.

Mon doppler ne fonctionne pas ou fonctionne mal :

1. Vérifier que le volume n'est pas au minimum
2. Vérifier que les écouteurs soient correctement enfoncés
3. Vérifier la puissance de la pile et la remplacer si nécessaire
4. S'assurer de ne pas avoir oublié de mettre du gel ultrason entre la sonde et la peau.
5. Si le Chamade s'éclaire mais que l'audio ne fonctionne pas, il est probable que la pile ne soit plus assez puissante. Il faut alors la remplacer.

Attention : Il est parfaitement normal d'entendre des bruits « parasites » lors du déplacement de la sonde. Ceux-ci peuvent être très forts. Il ne s'agit pas d'un problème.



SIEUR
bé

€

MONSIEUR
bébé

Ce produit vous a été apporté par :



Distribution

EGK Distribution

231 avenue de la Voguette

84300 Cavaillon

04 90 04 95 27